




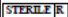


 0373	Conforme alla direttiva Europea 93/42/CEE Complies with the European Directive 93/42 / EEC Entspricht der europäischen Richtlinie 93/42 / EWG Conforme à la directive européenne 93/42 / CEE Cumple con la Directiva Europea 93/42 / EEC Em conformidade com a Directiva Europeia 93/42 / EEC Conformă cu Directiva Europeană 93/42 / CEE
	Sterile se non aperto o danneggiato / Raggi Beta Sterile if not opened or damaged / Beta rays Steril, wenn nicht geöffnet oder beschädigt / Beta-Strahlen Sterile si non ouvert o endommagé / Rayons bêta Esteril si no está abierto o dañado / rayos Beta Esteril se não for aberto ou danificado / raios Beta Steril dacă nu sunt deschise sau deteriorate / raze beta
	Non riutilizzare Do not reuse Nicht wiederverwenden Ne pas réutiliser No reutilizar Não reutilizar Nu reutilizați
	Consultare le istruzioni per l'uso Consult the instructions for use Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung Consultez les instructions d'utilisation Consulte as instruções de uso Consultati instrucțiunile de utilizare
	Temperatura di conservazione Storage temperature Lagerstemperatur Température de stockage Temperatura de almacenamiento Temperatura de armazenamento Temperatura de depozitare
	Numero di catalogo Catalog number Katalognummer Número de catálogo Número de catálogo Número de catálogo Numărul de catalog
	Codice partita / Numero lotto Match code / lot number Matchcode / Chargennummer Code de correspondance / numéro de lot Código del partido / número de lote Código da partida / número do lote Codul marelui / numărul lotului
	Data di scadenza Expiration date Ablaufdatum Date d'expiration Fecha de caducidad Data de validade Data expirării
	Data di fabbricazione Manufacturing date Herstellungsdatum Date de fabrication Fecha de fabricación Data de fabricaço Data fabricării

EXAFLEX

EXAFLEX Nagy sűrűségű kollagén mátrix, amely nem térhálóított szarvasmarha szívburokból áll. 20 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhákából származik. A termék lehetővé teszi az újonnan képződött kollagén képződését és az implantátum ezt követő vaszkularizációját. Ezt követően az implantátumot átalakítják, és gádzsövettel helyettesítik. A zsigerekkel való érintkezés esetén az EXAFLEX készülék minimálisra csökkenti a tapadási jelenségeket.

HASZNÁLATI JAVASLATOK: Az EXAFLEX membrán és por a következő felhasználásokhoz készült:

- vizelet inkontinencia, a medencefenék rekonstrukciójában, vulnológia
- hüvelyi és végbélsüllyedés helyreállítása
- lágyrész hiányosságok műtéti javítása, mellimplantátum beültetése
- a has és a mellkas falainak javítása
- izomlebecnyek, szalagok és inak erősítése
- sérvjavítás, érsebészet, ideg- és duramam javítás.
- a fogászatban a lágy szövetek sebészi helyreállítására és a csontszövet epiteliális inváziója elleni gáthatásként

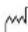ELLENJAVALLATOK: Szarvasmarha eredetű származékokkal szembeni ismert vagy feltételezett érzékenység. A terméket nem tesztelték terhes alanyokon.

MELLÉKHATÁSOK: Mint minden sebészeti beavatkozásnál, előfordulhatnak mellékhatások.

ÖVINTÉZKEDÉSEK: A termék eldobható, így a csomagolás felbontása után a maradékot nem lehet újra felhasználni vagy újraszterilizálni.

Használat előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, ellenkező esetben ne használja. A helytelen használat műtéti jellegű szövődeményeket okozhat.

Ne használja a terméket, hacsak nem a gyártó utasításainak megfelelően tárolta.

FIGYELEMA: termék használata során soha nem szabad kiszáradni, állandóan merítsük steril fiziológiás oldatba. Abban az esetben, ha arra kényszerül, hogy szennyezett helyen használja a terméket, javasolt helyi és szisztémás szintű megfelelő intézkedések megtétele a szennyeződés/fertőzés visszaszorítása érdekében.

TÁROLÁS: A terméket tiszta és száraz környezetben kell tárolni. A tárolási hőmérséklet a termék eltarthatósága alatt nem lehet 0 °C / 32 °F alatt. NE tárolja hűtött cellákban.

SZÁLLÍTÁS: A bontatlan szállítás normál körülmények között történhet. Mind a termék, mind az eredeti csomagolás ki van téve rövid ideig tartó hőmérséklet-változásoknak.

UTASÍTÁS: Az alábbi utasítások nem utalnak a sebészeti technikára, és nem helyettesítik az intézményi protokollokat vagy a betegellátásra vonatkozó szakmai klinikai ítéleteket. Nyissa ki a csomagolást a műtő aszepszisének tiszteletben tartásával, és rehidratálja a membránt szobahőmérsékleten, steril fiziológiás oldatba merítve. A termék hosszú ideig, 2 vagy több órán keresztül vízben is tárolható. A termék antibiotikus sóoldatba meríthető.

A terméket a sebészeti igényeknek és a helyi előírásoknak megfelelően használja.



GYÁRTÓ:
MAGGI s.r.l.
Fraz. San Pietro, 10
Piovea Massaia – 14026 (AT) Italy

GYÁRTÁSI MŰHELY:
MAGGI srl
Via Tetti Castagno, 5/A
Andezeno – 10020 (TO) Italy

 0373